




บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจโควิด ATK ยี่ห้อ GICA สุขสบาย แบบ 2 in 1

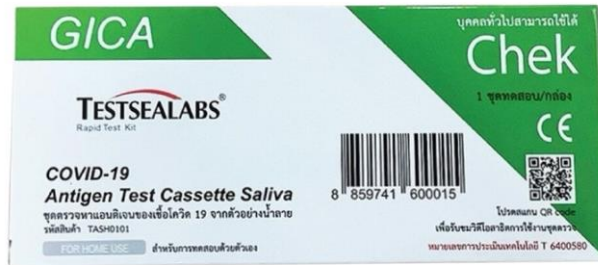

1. วัตถุประสงค์

ชุดตรวจโควิด ATK ยี่ห้อ GICA แบบ 2in1 เป็นชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเอง สามารถใช้ได้ทั้งการตรวจทางน้ำลายและทางจมูก ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) WHO และยังมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดโอไมครอน สามารถวัดค่าได้แม่นยำมาก

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. แสดงผลลัพธ์ใน 15 นาที
- 2.2. ไม่ต้องใช้อุปกรณ์
- 2.3. เก็บตัวอย่างง่าย
- 2.4. อ่านค่าวัดได้ง่าย
- 2.5. มีเครื่องหมาย CE

3. วิธีการเก็บตัวอย่างจากเสมหะหรือน้ำลาย

- 3.1. ล้างและบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
- 3.2. กลั้วคอและกระแอมเสมหะ/น้ำลายในช่องปากจากลำคอขึ้นมา
- 3.3. บ้วนเสมหะ/น้ำลายในช่องปากใส่ลงในถ้วยกระดาษ
- 3.4. ใช้หลอดดูดตัวอย่างขึ้นมา 20 ไมโครลิตร



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 3.5. แล้วหยดลงไปหลอดบรรจุน้ำยาสกัด
- 3.6. ปิดฝาหลอดให้แน่นแล้วเขย่าหลอดประมาณ 10 ครั้ง
- 3.7. ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วเตรียมทดสอบ
- 3.8. เขย่าอีก 3-5 ครั้งก่อนหยดตัวอย่างลงไป 3 หยด
- 3.9. รออ่านผล 15 นาที

4. วิธีการเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก

- 4.1. แยกก้านเข้าไปในโพรงจมูก ความลึกประมาณ 2-4 ซม. (สำหรับเด็ก 1-2 ซม.) จรกระทั่งชนกับผนังโพรงจมูก โดยทำอย่างเบามือ
- 4.2. หมุนก้านสำหรับเก็บตัวอย่างภายในโพรงจมูก 5 ครั้ง ภายใน 7-10 วินาที เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่งในจมูก และทำซ้ำในรูจมูกอีกข้างด้วยก้านไม้อันเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างสารคัดหลั่งในจมูกที่ได้นั้นเพียงพอ จากนั้นค่อย ๆ ดึงก้านออกจากจมูก
- 4.3. นำก้านสำลิจากการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกจุ่มลงในหลอดบรรจุน้ำยาสกัด
- 4.4. บีบปลายก้านสำลิจับผนังหลอดบรรจุน้ำยาสกัด แล้วดึงทิ้งไว้ 1 นาที หลังจากนั้นนำก้านสำลิจากแล้วปิดด้วยฝาหลอดสำหรับหยดน้ำยา
- 4.5. การใส่ตัวอย่างลงบนชุดตรวจให้ปฏิบัติตามนี้ คือตั้งหลอดน้ำยาให้ตั้งฉากกับหลุมสำหรับหยด โหยหยดตัวอย่างลงไปหลุม 3 หยด จากนั้นรออ่านผล 15 นาที

5. ผลการทดสอบ

- 5.1. ผลบวก : ปรากฏเส้นสีแดง 2 เส้น (แถบควบคุม C และแถบทดสอบ T)
- 5.2. ผลลบ : ปรากฏเส้นสีแดงเพียง 1 เส้น ที่ตำแหน่ง C ไม่สามารถแปลผลได้
- 5.3. หากปรากฏเส้นสีแดง ที่ตำแหน่ง T แสดงว่าขั้นตอนไม่ถูกต้อง

6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 6.1. ตลับทดสอบ
- 6.2. หลอดบรรจุน้ำยาสกัด
- 6.3. ถ้วยกระดาด
- 6.4. หลอดหยดชนิดใช้ครั้งเดียว