



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจโควิด ATK ทางจมูก YUWELL รุ่น SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)(Nasal)



1. วัตถุประสงค์

ชุดตรวจโควิด ATK ทางจมูก ยี่ห้อ Yuwell SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)(Nasal) เป็นชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตนเอง ใช้ทางจมูก ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) WHO สามารถวัดค่าได้แม่นยำมาก

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้สำหรับการตรวจหาแอนติเจนของ SARS-Cov-2 ในตัวอย่างที่เชื้อโพรงจมูกด้านหน้า
- 2.2. อ่านผลได้ภายใน 10 นาที
- 2.3. ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
- 2.4. กล่องบรรจุ
- 2.5. 1 ชุดตรวจ/กล่อง (XGKY0101)



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. วิธีการเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก

- 3.1. แยกก้านเข้าไปในโพรงจมูก ความลึกประมาณ 2-4 ซม. (สำหรับเด็ก 1-2 ซม.) จรกระทั่งชนกับผนังโพรงจมูก โดยทำอย่างเบามือ
- 3.2. หมุนก้านสำหรับเก็บตัวอย่างภายในโพรงจมูก 5 ครั้ง ภายใน 7-10 วินาที เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่งในจมูก และทำซ้ำในรูจมูกอีกข้างด้วยก้านไม้อันเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างสารคัดหลั่งในจมูกที่ได้นั้นเพียงพอ จากนั้นค่อย ๆ ดึงก้านออกจากจมูก
- 3.3. นำก้านสำลีที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกจุ่มลงในหลอดบรรจุน้ำยาสกัด
- 3.4. บีบปลายก้านสำลิกับผนังหลอดบรรจุน้ำยาสกัด แล้วดึงทิ้งไว้ 1 นาที หลังจากนั้นนำก้านสำลีออก แล้วปิดด้วยฝาหลอดสำหรับหยคน้ำยา
- 3.5. การใส่ตัวอย่างลงบนชุดตรวจให้ปฏิบัติตามนี้ คือตั้งหลอดน้ำยาให้ตั้งฉากกับหลุมสำหรับหยด โดยหยดตัวอย่างลงไปหลุม 3 หยด จากนั้นรออ่านผล 10 นาที

4. ผลการทดสอบ

- 4.1. ผลบวก : ปรากฏเส้นสีแดง 2 เส้น (แถบควบคุม C และแถบทดสอบ T)
- 4.2. ผลลบ : ปรากฏเส้นสีแดงเพียง 1 เส้น ที่ตำแหน่ง C ไม่สามารถแปลผลได้
- 4.3. หากปรากฏเส้นแสดง ที่ตำแหน่ง T แสดงว่าขั้นตอนไม่ถูกต้อง

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 5.1. คลັບทดสอบและสารกันความชื้น
- 5.2. หลอดบรรจุน้ำยาสกัดและฝาปิด
- 5.3. ไม้เก็บตัวอย่างแบบใช้แล้วทิ้ง
- 5.4. คู่มือการใช้งาน